

SZŐR MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

MAGYAR HEREFORD, ANGUS, GALLOWAY TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2., Tel.: 0682/316-610, 312-331, Fax: 0682/510-046, e-mail: hereford@t-online.hu



SZŐR MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ DNS ALAPÚ SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉSHEZ

A pontos vizsgálati eredmények érdekében kérjük, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Ellenőrizze az állat fűlszámát, és írja le ezt a számot a szőrminta gyűjtőre!
2. Mindig használjon tiszta kesztyűt!
3. Mindig tiszta szőrből gyűjtsön mintát és ellenőrizze, hogy nem szennyezett-e ürülékkel a mintavételi terület.
4. Vegye az egyik kezébe a farokbojtot, majd a másik kezével húzzon ki egy ceruza vastagságú szőrcomót (20-25 szőrszál).
5. A mintavételnél nagyon fontos, hogy szőrtüszővel együtt húzza ki, egyenletes határozott mozdulattal, mert a szőrszál nem, csak a végén található tüsző tartalmaz DNS-t! - Minél több szőrtüsző található a mintában, annál több anyag áll rendelkezésre a vizsgálathoz és elegendő minta jut tárolásra is, ha esetleg szeretné használni a mintát a későbbiek folyamán egy újabb ellenőrzéshez.
6. A kesztyűt fordítsa vissza, miután a szőrcomót sikeresen kihúzta, majd kössön rá egy csomót, írja rá az egyed fűlszámát, helyezze borítékba és küldje az alábbi címre:
Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete,
H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.