

# VÉR MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

**MAGYAR HEREFORD, ANGUS, GALLOWAY TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE**

H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2., Tel.: 0682/316-610, 312-331, Fax: 0682/510-046, e-mail: hereford@t-online.hu



## VÉR MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ


### DNS ALAPÚ SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉSHEZ

A pontos vizsgálati eredmények érdekében kérjük, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Az állat fülszámának azonosítása, a tesztcsíkon történő felírása.
2. Az állat fülének tisztítása nedves törlővel, ha szükséges.
3. Egy sima oltó tűvel (18G-s méret) az állat fülének belső részében futó éren egy határozott mozdulattal szúrást ejteni. (A vérvétel helyére ez a javasolt, de vehető minden más testtájrról is.)
4. A kijövő vére a papírt rá kell nyomni úgy, hogy minden körbe kerüljön vérminta.
5. Az alábbi képeken látszik, hogy mennyi vér elégséges.
6. Fontos, hogy minden egyes állatnál steril tűt kell használni.
7. Várja meg, amíg a kártya megszárad, helyezze vízhatlan borítékba és a mintavételtől számítva, 24 órán belül postázza. (A papír megfogásához nem szükséges kesztyűt húzni.)
8. A mintavételhez szükséges papír Egyesületünknel igényelhető!
9. Kérjük, az alábbi címre szíveskedjen postázni a borítékot:


**Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete**

**H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.**

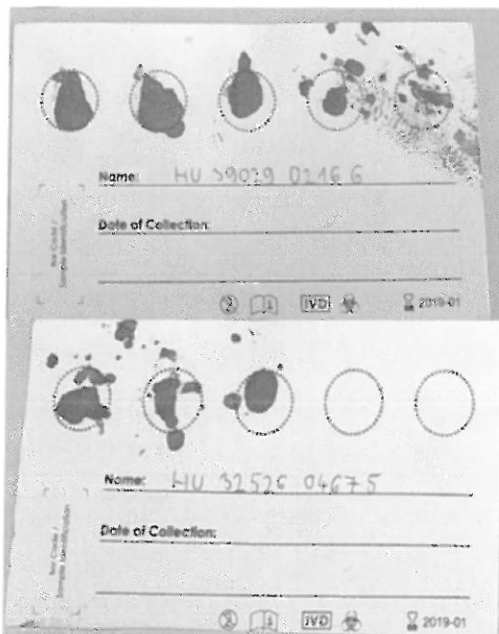

### Nem megfelelő minta:

- kevés (mind az öt kört teljes egészében át kell itatni vérrel)
- szennyezett (állati ürülékkel, takarmánnyal, szőrrel)
- nem lett beszárítva csomagolás előtt (gombásodás veszélye)
- nem egyesével vannak a minták csomagolva (minták keveredése)
- nem papír alapú csomagolás (gombásodás veszélye)
- nem szobahőmérsékleten tárolt

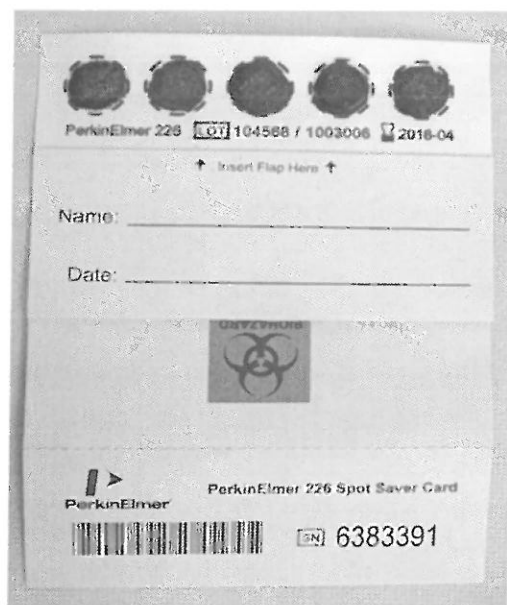

### Megfelelő minta:

- mind az öt kört teljes egészében át van itatva vérrel
- nem szennyezett
- be lett szárítva csomagolás előtt
- a kártyák egyesével vannak csomagolva papírba (nem érnek össze, nem keverednek)
- szobahőmérsékleten tárolt, maximum 7 napig.

**Kérés esetén megfelelő mintavételi papírt tudunk biztosítani!**